

Microlet®

Lancettes Colorées • Lancette Colorate • Farbige Lanzetten • Gekleurde Lancetten



Tourner d'un $\frac{1}{4}$ de tour le capuchon protecteur rond de la lancette, sans toutefois l'enlever. • Allentare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta ruotandolo di $\frac{1}{4}$ di giro, ma senza rimuoverlo. • Drehen Sie die Schutzkappe einer Lanzette um eine Viertelumdrehung, nehmen Sie sie aber nicht ab. • Maak het ronde beschermdopje van een lancet los door het dopje een kwartslag te draaien, maar verwijder het dopje niet.



Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée. • Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo di prelievo fino in fondo. • Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe. • Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat het lancet niet verder kan.



Enlever le capuchon protecteur rond de la lancette. Le conserver pour l'élimination de la lancette usagée. • Svitare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta. Conservarlo per il successivo smaltimento della lancetta usata. • Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Halten Sie sie bereit, um die benutzte Lanzette später zu entsorgen. • Draai het ronde beschermdopje van het lancet af. Bewaar de dop om te gebruiken bij het weggooien van het gebruikte lancet.

Éjecter et éliminer la lancette usagée. Consulter les instructions fournies avec l'autopiqueur. • Espulsione e smaltimento della lancetta usata. Consultare le istruzioni fornite con il dispositivo di prelievo. • Werfen Sie die gebrauchte Lanzette aus und entsorgen Sie sie. Bitte beachten Sie die Anweisungen zu Ihrer Stechhilfe in der Bedienungsanleitung. • Werp het gebruikte lancet uit en gooi het weg. Zie de instructies bij uw prikapparaat.